


LE BON CHOIX POUR LA DESINFECTION PROFESSIONNELLE DES SURFACES

Incidin® Pro

Le nouveau désinfectant sans aldéhydes pour les dispositifs médicaux et les surfaces

Grâce à sa formule offrant un équilibre parfait, Incidin® Pro définit une nouvelle norme pour le nettoyage professionnel et la désinfection des surfaces.

- ▶ Votre Pro pour la rapidité
- ▶ Votre Pro pour l'efficacité
- ▶ Votre Pro pour la tolérance

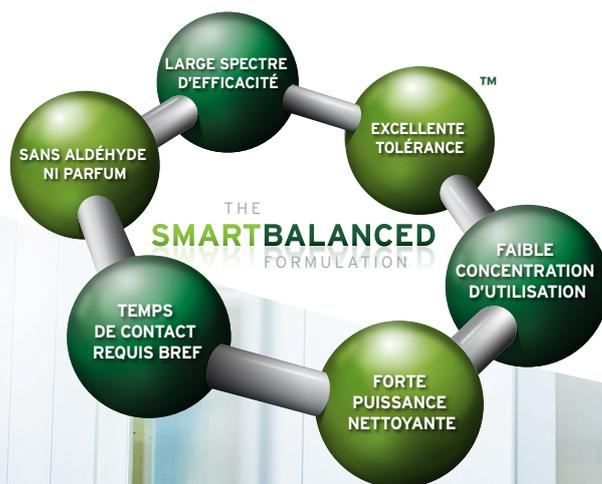

Incidin® Pro

Le nouveau désinfectant sans aldéhydes pour les dispositifs médicaux et les surfaces

Notre prestation	Votre avantage
Large spectre d'efficacité - testé selon les normes EN en vigueur	Désinfection et nettoyage efficaces
Temps de contact requis bref pour de faibles concentrations d'utilisation.	Gain de temps et d'argent
Forte puissance nettoyante	Des surfaces propres avec une compatibilité supérieure avec les matériaux
Excellente tolérance	Bonne tolérance avec les matériaux en métal, linoléum, PVC, céramique, caoutchouc et plastique

EFFICACITÉ	CONCENTRATION		TEMPS DE CONTACT
	%	ml/L	min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide)			
Désinfection de surfaces conformément à VAH, mécaniquement, avec faible charge et charge élevée	0,5/1,0	5/10	30/15
Selon la recommandation RKI 1/2004			
Action virucide limitée (y compris VIH, VHB, VHC)	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Normes EURO			
EN 13727 (bactéricide avec / sans charge)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levuricide avec / sans charge)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mycobactéricide)	1,5	15	60
EN 14476 (norovirus)*	1,0/1,5	10/15	60/30
Contrôle effectué selon DGHM 2001			
Mycobactéricide	2,0/4,0	20/40	120/60
Contrôle effectué selon DVV 2008			
Norovirus (MNV)	1,5	15	30
Rotavirus	1,0/1,5	10/15	60/5
Adénovirus	2,0	20	60
Polyomavirus SV40	1,5	15	15

* dirty conditions

RAPIDE.
EFFICACE.
BIEN TOLERE.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le nettoyage et la désinfection professionnelle de dispositifs médicaux et de surfaces en tout genre.

REMARQUES

Utiliser des biocides en toute sécurité. Lisez attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit avant utilisation. Éliminez uniquement les emballages vides et fermés.

Restes de produit : Cf. la fiche des données de sécurité.

COMPOSITION

100 g contiennent le principe actif suivant : 10,0 g de 2-phénoxyéthanol, 8,0 g N,N-bis-(3-aminopropyl) dodécylamine, 7,5 g chlorure de benzalkonium

INFORMATIONS RELATIVES A LA COMMANDE

Produit	Unité de conditionnement	Numéro d'article
Incidin® Pro Sachet	400 x 20 ml	3076560
Incidin® Pro Flaçon recharge	3 x 2 L	3076680
Incidin® Pro Bidon	6 L	3076760

UTILISER DES BIOCIDES EN TOUTE SECURITE.
TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT
L'ÉTIQUETAGE ET L'INFORMATION PRODUITS
AVANT UTILISATION.

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

REGIONAL OFFICE

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstrasse 91
4132 Muttenz
Phone +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

